




Ko je Nanny?

- Nanny je sistem koji **nadgleda disanje bebe** dok mama spava ili radi u stanu.
- Nanny neprestano proverava da li beba diše i da li se pomera, da bi brzo dala upozorenje u slučaju opasnosti.
- Nanny zvučno i vizuelno oglašava alarm u slučaju da beba ne diše ili se ne pomera duže od 20 sekundi, ili ako učestalost njenog disanja padne ispod 8 udisaja u minuti. Ovo omogućava pravovremenu indikaciju Sindroma Iznenadne Dečije Smrti (SIDS) i drugih životno-ugrožavajućih simptoma (alergije, iznenadne bolesti, gušenje...), i daje vam dovoljno vremena da spasite bebu.
- *Obratite pažnju da vas Nannysamo upozorava kada vaša beba ne diše pravilno ili kada ne diše uopšte. Nanny ne može zameniti bebi-siterku ili reagovati sama.*

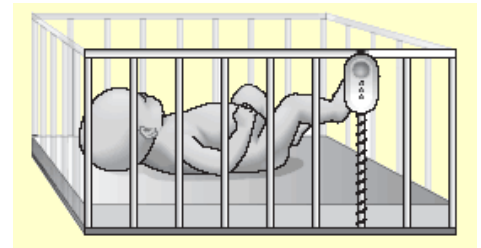

Kako Nanny pomaže mami?

Senzorska površina sistema Nanny, koja se nalazi ispod dušeka bebinog krevetića, detektuje nežne pokrete bebinog grudnog koša. Signali iz senzora se šalju indikatoru, koji normalno disanje i pokrete označava zelenom lampicom.

Nanny nema nikakav fizički kontakt sa bebom i ne stvara nikakvo zračenje.

Pasivni senzor nema nikakve štetne efekte na malo ljudsko telo.




Gde se Nanny koristi?

Nanny nećete naći samo u domovima brižnih i ponosnih roditelja, nego i u bolnicama (porodilištima, GAK-ovima, specijalizovanim klinikama...). Nanny je napravljena u skladu sa evropskim standardima za medicinske uređaje.

Nanny se veoma lako ugrađuje

Postavljanje sistema Nanny je vrlo brzo i jednostavno. Postavite senzorsku površinu ispod dušeka. Ubacite baterije u indikator, pa ga zatim fiksirajte za krevetac pomoću kaiševa. Čim povežete kabl senzora sa indikatorom, Nanny je spremna za čuvanje.

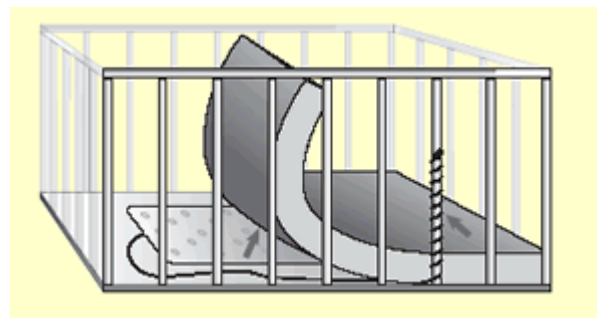

Nanny se veoma lako koristi

Kada stavite bebu u krevetac, uključite indikator (dobićete zvučnu i vizuelnu potvrdu uključivanja). Zelena lampica treperi u skladu sa bebinim disanjem i pokretima. U slučaju alarma, sirena će se oglasiti i crvena lampica će se uključiti. Crvena lampica treperi kada je baterija pri kraju.